



ОАО "Уральский завод химических реактивов"
РОССИЯ, 624096, Свердловская обл, г. В. Пышма, ул. Ленина 131

Набор трубок индикаторных одноразовых для контроля трезвости по выдыхаемому воздуху

Изделие выпускается в виде "Набора трубок индикаторных одноразовых для контроля трезвости по выдыхаемому воздуху" в пластмассовом пенале. Для пополнения изделия трубками используются "Трубки контроля трезвости". Хранить в сухих неотапливаемых и отапливаемых помещениях. Размещение вблизи отопительных и нагревательных приборов недопустимо.

Состав набора:

Пенал	1 шт.
Трубка	10 шт.
Мундштук в пакете	10 шт.
Баллон респираторный	1 шт.
Вскрывать (закреплён в пенале)	1 шт.
Инструкция-памятка (в пенале)	1 шт.

Изделие предназначено для обнаружения алкоголя в организме человека по выдыхаемому через трубку воздуху.

ТУ 9398-003-00205087-2004

Гарантийный срок годности 2 года.

Дата изготовления

Штамп ОТК



ИНСТРУКЦИЯ - ПАМЯТКА

- 1 Вскрыть Трубку с обеих концов, для чего:
Вставить конец трубки в одно из отверстий открывателя и обломить его, нажав на трубку, таким же образом вскрыть трубку с другого конца.
- 2 Вставить В индивидуальный мундштук конец трубки, расположенный дальше от наполнителя, противоположный - в мундштук респираторного баллона.
- 3 Взять мундштук в полость рта и продуть воздух через трубку до полного заполнения баллона.
- 4 Через 1-2 мин. При наличии паров алкоголя жёлто-оранжевая окраска наполнителя меняется на зелёную.
- 5 Положительную реакцию в трубке, кроме паров этилового спирта, могут вызвать пары метанол-яда, ацетона, альдегидов, сероводорода. Последний действует на наполнитель в больших концентрациях.
- 6 Хранить в тёмном месте.
- 7 **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

При использовании беречься от порезов стеклом, беречь глаза, кожу, одежду от попадания наполнителя, а при попадании-немедленно промыть проточной водой. При просыпке наполнителя сделать влажную уборку.