



Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать
онлайн удобно
www.medi-salon.ru

Инструкция по использованию

protect.Clavicle support («ПРОТЕКТ.КЛАВИКУЛ СУППОРТ»)

Бандаж ключичный (protect.Clavicle® support)

Регистрационное удостоверение № ФЗС 2009/04879

от 18 августа 2009 года, срок действия не ограничен.

Уважаемый покупатель,

спасибо, что Вы выбрали бандаж protect.Clavicle support. Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию и убедитесь, что Вы умеете правильно надевать изделие и знаете правила его эксплуатации.

Показания

Все типы переломов ключицы.

Полные и частичные разрывы акромиально-ключичного сочленения.

Принцип действия


Бандаж фиксирует плечи в положении отведения назад, выпрямляя осанку и разгружая ключичную область.

Противопоказания

Обструкция дыхательных путей.

Сдавление нервно-сосудистого пучка.

Инструкция по надеванию

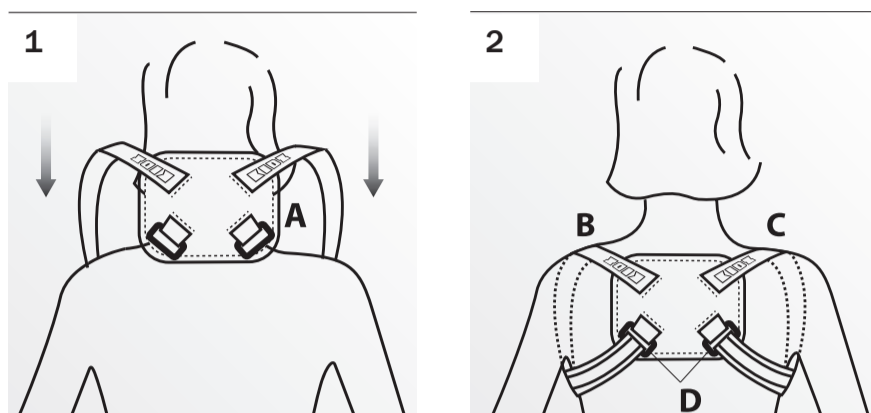

Бандаж для фиксации положения ключицы уже готов к использованию. Не требуются замеры, отрезания, подкладки и завязывание, как при использовании привычных трубчатых повязок. Вы быстро обратите внимание на приятную экономию времени.

1. Наденьте часть А приспособления на плечи (см. рисунок 1) так, чтобы ремни (части В и С) были расположены сверху.
2. Поместите ремни В и С под мышки, проденьте в соответствующие застёжки D, натяните и застегните (см. рисунок 2).

ВНИМАНИЕ! При натягивании ремней плечи пациента должны быть отведены назад.

Важная информация

Данное изделие предназначено только для индивидуального применения. В случае использования изделия более чем одним пациентом гарантии производителя утрачивают силу. Если при использовании изделия возникли боли или неприятные ощущения, пожалуйста, незамедлительно обратитесь к Вашему лечащему врачу. Не используйте изделие при наличии незакрытых асептическими повязками ран. Применяйте изделие только согласно рекомендациям лечащего врача.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев с момента продажи при условии использования изделия по назначению.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате: а) каких-либо происшествий, неправильного использования, экстремальных условий эксплуатации или неправильного хранения; б) воздействия чрезмерных усилий; в) непредусмотренного производителем использования или внесения изменений в конструкцию.

Срок годности изделия

Срок годности не ограничен.

Инструкция по уходу

Стирайте изделие вручную в прохладной воде (30 °С) с использованием обычного мыла.

Тщательно прополощите: остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать ускоренному износу материала. Не отжимайте. Сушите изделие на воздухе. Не гладьте.

Изделие можно использовать как в пресной, так и в соленой воде. После использования в воде тщательно прополощите изделие и высушите на воздухе. Не выводите пятна с помощью бензола и других химикатов-детергентов.



Состав

Тканевая основа:

полиэстер 82%, эластан 18%

Наполнитель:

полиамид, пенополиэтилен, полиэстер

Ремни и крепления:

полиэстер, полиамид, нейлон

Цвет

Голубой (blue)

Инструкция по хранению

Храните изделие в сухом прохладном месте вдали от прямого солнечного света.

Инструкция по утилизации

Изделие утилизируют вместе с бытовыми отходами.

Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!

Все претензии и пожелания принимает ООО «МЕДИ РУС» - импортер и уполномоченный представитель производителя в России по адресу:

121609, Москва, ул. Осенняя, 4, корп. 1