



Инструкция по эксплуатации

LUX 400

Благодарим Вас за выбор сиденья для ванны Ortonica. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации до того, как начнется им пользоваться.

Компания Ortonica желает Вам приятной и безопасной эксплуатации.

Содержание

1. Общая информация

| | |
|---|---|
| 1.1 Назначение..... | 2 |
| 1.2 Ответственность..... | 2 |
| 1.3 Указания по технике безопасности..... | 2 |

2. Распаковка и сборка

| | |
|------------------------------|---|
| 2.1 Комплектация..... | 3 |
| 2.2 Распаковка и сборка..... | 3 |

3. Эксплуатация сиденья для ванной

| | |
|------------------------|---|
| 3.1 Пересаживание..... | 3 |
| 3.2 Установка | 3 |
| 3.3 Регулировки..... | 4 |

4. Техническое обслуживание и уход

5. Гарантийное обслуживание

1. Общая информация

1.1 Назначение

Сиденье для ванны Ortonica Lux 400 предназначено для проведения санитарно-гигиенических процедур в ваннных комнатах.

1.2 Ответственность

Изготовитель несет ответственность только при использовании изделия в заданных условиях и в соответствии с предусмотренным назначением. Изготовитель рекомендует использовать изделие надлежащим образом и осуществлять уход в соответствии с данной инструкцией. Изготовитель не несет ответственности за повреждение вследствие использования неразрешенных элементов и запасных частей.

1.3 Указания по технике безопасности



- Рекомендуем перед началом использования сиденья для ванной прочитать инструкцию по эксплуатации. Для безопасной первичной эксплуатации рекомендуем прибегнуть к помощи сторонних лиц.
- Запрещается эксплуатировать изделие с незакрепленными деталями.
- Не устанавливайте сиденье на наклонной поверхности
- Перед эксплуатацией протрите изделие теплой водой с моющими средствами.

2. Распаковка и сборка

2.1 Комплектация

В комплект входят:

- картонная коробка 1 шт.
- сиденье для ванной 1 шт
- инструкция по эксплуатации 1 шт.

2.2 Распаковка и сборка

Сиденье для ванной упаковано в картонную коробку, которую мы рекомендуем сохранить. Изделие не требует сборки, так как поставляется в собранном виде.

3. Эксплуатация

3.1 Пересаживание

Помните, что, совершая пересаживание, во всех случаях лучше воспользоваться сторонней помощью, чтобы предупредить возможность получения травм.

3.2 Установка

Установите сиденье на ванную. При необходимости отрегулируйте ширину рамы для соответствия ширине вашей ванной.

3.3 Регулировки

Сиденье для ванны Lux 400 настраивается по ширине ванной. Чтобы изменить ширину рамы, необходимо снять фиксаторы, вынуть опоры и установить их на необходимый уровень. После регулировки установите фиксатор в исходное положение.



4. Техническое обслуживание и уход

- При эксплуатации сиденья для ванны необходим определенный технический уход.
- Периодически проверяйте затяжку резьбовых соединений. Любые резьбовые соединения не должны крутиться от руки без сопротивления.
- Рама выполнена из алюминиевого сплава, имеет полимерное покрытие, не подверженное коррозии при контакте с водой, что облегчает санитарную обработку стула.
- При очищении допустимо использование воды и мягких моющих средств. Запрещается применение абразивных моющих средств и растворителей (ацетон, спирт и т.д.). После санитарной обработки рекомендуется насухо вытереть стул.
- Следует предохранять сиденье от ударов твердыми и острыми предметами.)

5. Гарантийное обслуживание

Гарантийный срок эксплуатации: 1 год

Производитель: "Фошан Донгфэнг Медикал Эквипмент Мануфактори, (Лтд.)" Китай, Foschan Dongfang Medical Equipment Manufactory, Ltd, 5 Xingfu Rd., Zone A, Shishan Industrial Park, Nanhai District, Foshan city, China.

Импортер в России: ООО "Реамед"

Адрес : 394026. г. Воронеж, Московский пр-т,

11 Тел: +7 (473) 300-31-91

По вопросам гарантийного обслуживания Вы можете обратиться по телефону: 8 800 500 14 14



8-800-500-14-14
ortonica.ru