



ortonica

Life in motion



Инструкция по эксплуатации

XR 102

Описание

Средства реабилитации для инвалидов: ходунки Ortonica XR 102 (далее по Руководству - ходунки) - приспособление для передвижения людей с нарушением опорно-двигательной системы и пожилых людей в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием, улучшают координацию движений, позволяют сохранить равновесие и уменьшают нагрузку на нижние конечности.

Для того, чтобы исключить вероятность травмирования пользователя или повреждения оборудования не пренебрегайте рекомендациями данного Руководства и общими требованиями безопасности.

Показания

- Болезни системы кровообращения, органов дыхания, органов пищеварения, мочеполовой системы;
- Умеренные и выраженные явления гемипареза;
- Реабилитация после операций, травм и переломов конечностей;
- Заболевания опорно-двигательного аппарата.

Противопоказания

- Психические расстройства;
- Потеря функциональности обеих рук;
- Нарушения статики и координации движения;
- Тяжелые нарушения вестибулярного аппарата;
- Ограниченная или недостаточная способность к ориентации;
- Наркотическое или алкогольное воздействие.

Меры предосторожности

- Никогда не пытайтесь подняться по лестнице или эскалатору с ходунками;

- Не переносите весь вес тела на одну сторону рамы – ходунки могут опрокинуться;
- Не ходите по мокрому или скользкому полу;
- Не используйте ходунки, если не уверены в их исправности;
- Ходунки нельзя тянуть на себя, поднимаясь с кресла или кровати;
- Нельзя использовать ходунки при головокружении;
- Нельзя подходить слишком близко или в упор к ходункам;
- Старайтесь поддерживать максимально ровное положение спины и всего тела – держать осанку;
- При ходьбе необходимо смотреть вперед, а не под ноги.

Технические параметры

Параметры	XR 102
Габариты (ДхШхВ) (± 5%), мм	610x600x810-920
Ширина между ручками (± 5%), мм	490
Высота до сиденья (± 5%), мм	550
Диаметр колес (передние/ задние), (± 5%), мм	150/150
Площадь сиденья (± 5%), мм	320x350
Количество уровней регулировки высоты	6
Шаг регулировки высоты	2,5

Параметры	XR 102
Грузоподъемность (± 5%), кг	110
Масса (нетто/брутто) (± 5%), кг	6,85/8,5
Габариты упаковки (ДхШхВ) (± 5%), мм	620x240x840
Количество штук в упаковке	1

Описание

Ходунки изготовлены из металла, имеют высококачественное эмалевое лакокрасочное покрытие, складываются и раскладываются без инструмента.

Ходунки оснащены мягким сиденьем из искусственной кожи, полукруглым мягким упором для спины и корзиной для личных вещей. Рукоятки регулируются по высоте, обеспечивают прочность их захвата рукой и отсутствие скольжения при захвате, оснащены ручными тормозами, обеспечивающими подтормаживание при движении и фиксацию при использовании для отдыха сидя.

Подготовка к эксплуатации

1. Раздвиньте раму, поместите багажную корзину под сиденье и установите полукруглый мягкий упор для спины, установите ручки в раму.
2. Проверьте ходовые качества ходунков и тормоз, отрегулируйте высоту ручек.

Очистка

Производите дезинфекцию ходунков в соответствии с ОСТ 42-21-2-85. Наружные поверхности ходунков обрабатывают способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по приме-

нению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке.

Правила хранения и транспортировки

Ходунки в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80%.

В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

Ходунки транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Транспортировка и хранение ходунков без упаковки завода-изготовителя не гарантирует их сохранность. Повреждения, полученные в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя устраняются потребителем.

Ходунки не содержат вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации. Утилизация ходунков осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответствующей нормативной документации.

Комплектация

- Ходунки 1 шт.;
- Корзина 1 шт.;
- Болты-барашки 2 шт.;
- Полукруглый упор 1 шт.;
- Руководство 1 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предприятие-изготовитель систематически ведет работу по улучшению конструкции ходунков, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем Руководстве.

Сведения о сертификации

Средства реабилитации для инвалидов: ходунки Ortonica XR102 соответствуют техническим условиям и признаны годными для эксплуатации. Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4717. Производитель: «Гуандун Даянг Медикал Технолоджи Ко., Лтд.», Китай Guangdong Dayang Medical Technology Co., Ltd., Xingxian Development Zone, Changhongling Industrial Park (2nd Phase), Dali, Nanhai District, 528234 Foshan, Guangdong, China.

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящего Руководства. На быстроизнашивающиеся части гарантия не распространяется.

Сервисное обслуживание изделий производится в ООО "Реамед".

Адрес: 394016, г. Воронеж, Московский проспект, 42
Контактный телефон: 8(473)300-31-91; 300-31-51

Дата продажи	Подпись продавца / Поставщика



8-800-500-14-14

ortonica.ru