

medi



## Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно  
[www.medi-salon.ru](http://www.medi-salon.ru)



## Инструкция по использованию

### medi Classic («МЕДИ КЛАССИК»)

Шина для коленного сустава.

Регистрационное удостоверение № ФЗС 2011/09662 от 21 апреля 2011 года, срок действия не ограничен.

#### Уважаемый покупатель,

спасибо, что Вы выбрали шину medi Classic. Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию и убедитесь, что Вы умеете правильно надевать изделие и знаете правила его эксплуатации.

#### Показания

Иммобилизация коленного сустава после операций.  
Болевой синдром в предоперационном периоде.  
Иммобилизация после вправления вывиха надколенника.  
Повреждение связок коленного сустава.


#### Принцип действия

Иммобилизация коленного сустава. Алюминиевая шина анатомической формы, при необходимости может быть изогнута с учетом индивидуальных особенностей.

#### Противопоказания

До настоящего времени не выявлены.

#### Инструкция по надеванию

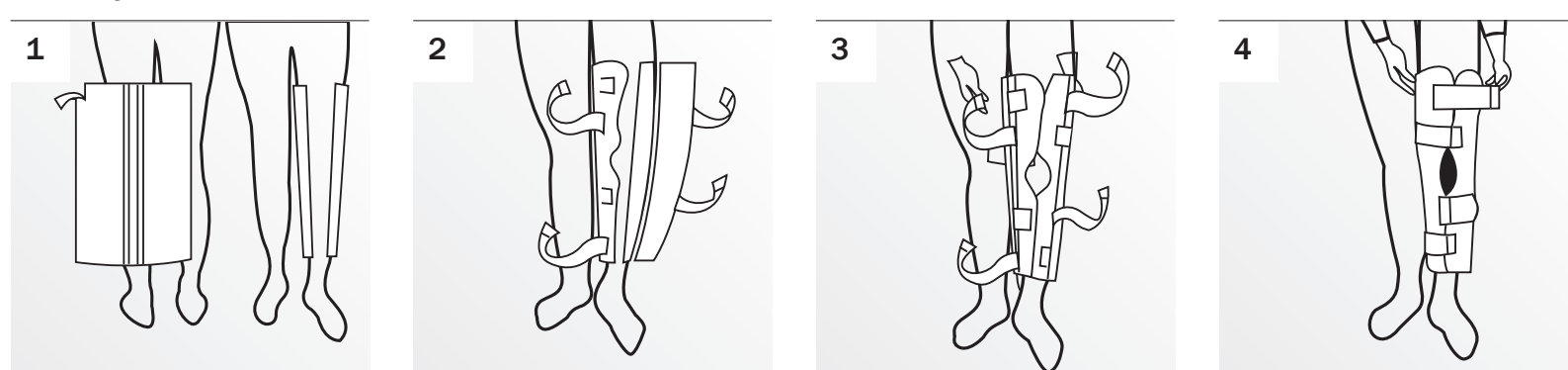

Расстегните все застежки-липучки на фиксирующих лентах и расположите шину так, чтобы вырез находился над надколенником. Внимание! Для обеспечения правильного положения на ноге шины medi Classic длину окружности изделия можно уменьшить или увеличить за счет изменения положения частей, закрепляемых застежкой-липучкой.

- Боковые ребра жесткости при необходимости можно изогнуть.
- Оберните боковые части шины вокруг ноги таким образом, чтобы коленная чашечка осталась открытой.
- Сначала застегните ленты, фиксирующие шину на бедре, затем ленты, фиксирующие на голени. Затем застегните ленты около надколенника.

#### Важная информация

Данное изделие предназначено только для индивидуального применения. В случае использования изделия более чем одним пациентом гарантии производителя утрачивают силу. Если при использовании изделия возникли боли или неприятные ощущения, пожалуйста, незамедлительно обратитесь к Вашему лечащему врачу. Не используйте изделие при наличии незакрытых асептическими повязками ран. Применяйте изделие только согласно рекомендациям лечащего врача.

#### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев с момента продажи при условии использования изделия по назначению.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате: а) каких-либо происшествий, неправильного использования, экстремальных условий эксплуатации или неправильного хранения; б) воздействия чрезмерных усилий; в) непредусмотренного производителем использования или внесения изменений в конструкцию.

#### Срок годности изделия

Срок годности не ограничен.

#### Инструкция по уходу

Стирайте изделие вручную в прохладной воде (30 °С) с использованием обычного мыла. Тщательно прополощите: остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать ускоренному износу материала. Не отжимайте. Сушите изделие на воздухе. Не гладьте. Изделие можно использовать как в пресной, так и в соленой воде. После использования в воде тщательно прополощите изделие и высушите его на воздухе. Не выводите пятна с помощью бензола и других химикатов-детергентов.



#### Состав

Тканевая основа:

полиэстер 82%, эластан 18%

Наполнитель:

полиамид, пенополиэтилен, полиэстер

Ремни и крепления:

полиэстер, полиамид, нейлон

Шина: алюминий

#### Инструкция по хранению

Храните изделие в сухом прохладном месте вдали от прямого солнечного света.

#### Инструкция по утилизации

Изделие утилизируют вместе с бытовыми отходами.

#### Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!

Все претензии и пожелания принимает ООО «МЕДИ РУС» - импортер и уполномоченный представитель производителя в России по адресу:  
121609, Москва, ул. Осенняя, 4, корп. 1