



RESTAUT^{MET}

Кровать медицинская механическая с переворотом

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



*Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение	стр. 3
1.1.	Поставка	стр. 3
2.	Правила безопасности	стр. 3
3.	Условия использования	стр. 3
4.	Технические характеристики	стр. 4
5.	Конструкция	стр. 4
6.	Комплект поставки	стр. 4
7.	Кровать в деталях	стр. 5
8.	Установка кровати	стр. 6
9.	Положения кровати	стр. 6
9.1.	Регулировка спинной секции	стр. 6
9.2.	Функция переворота	стр. 6
10.	Спинки кровати	стр. 7
11.	Боковые ограждения	стр. 7
12.	Очистка и дезинфекция	стр. 7
13.	Хранение	стр. 8
14.	Техническое обслуживание	стр. 8
15.	Гарантийные обязательства	стр. 9

1. Введение

Данная модель кровати предназначена для использования в медицинских учреждениях и в домашних условиях.

Кровать изготавливается в соответствии с международными стандартами (TS EN 60601-2-38). Наша компания работает в соответствии с нормами Системы менеджмента качества ISO 9001: 2008 и нормами медицинских изделий ISO 13485.



Чтобы правильно использовать данную кровать, внимательно прочитайте руководство пользователя перед её использованием. Наша компания не несёт ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять руководство пользователя в течение всего срока эксплуатации Вашей кровати.

ВНИМАНИЕ!

Производитель не несёт ответственность за любые повреждения, несчастные случаи и травмы, которые могут возникнуть из-за нарушения правил пользования. При использовании кровати важно соблюдать инструкции и правила техники безопасности.

1.1. Поставка

Наши кровати поставляются полностью смонтированными или разобранными на несколько частей. Перед использованием изделия вся кровать должна быть полностью собрана.

Если в комплектации кровати отсутствуют какие-либо детали или обнаружены повреждения, Вы должны немедленно письменно известить производителя / поставщика.

2. Правила безопасности

- Перед использованием кровати внимательно прочитайте руководство пользователя.
- Если в кровати обнаружены неисправности или повреждения, не используйте ее и немедленно сообщите об этом производителю/поставщику.
- Недопустимо создавать дополнительную нагрузку на кровать во время нахождения на ней пациента – например, сидение на ней еще одного человека недопустимо.
- При использовании функций кровати не допускайте зажимания ее элементами пациента или других лиц.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием химикатов или других чистящих материалов, приведшим к повреждению или коррозии поверхности.
- Если кровать перемещается вместе с пациентом, ограждения должны быть подняты и зафиксированы.
-

3. Условия использования

Кровать предназначена для использования в медицинских целях.

4. Технические характеристики

Габариты кровати	202*95 см
Габариты ложа	197*90 см
Высота ложа	50 см
Угол наклона спинной секции	0° до 87°
Угол наклона бокового переворота	0° до 52°
Максимальная распределенная рабочая нагрузка	200 кг

5. Конструкция

- Каркас кровати выполнен из профильных стальных труб, покрытых полимерно-порошковой эмалью.
- Спинки выполнены из ЛДСП, устанавливаются на быстросъемные механизмы.
- Ложе представляет собой стальные ламели, покрытые полимерно-порошковой эмалью.
- Складные боковые ограждения с курками-фиксаторами со стороны ножных торцов.
- Функция переворачивания осуществляется с помощью вращения рычагов.
- Регулировки секций осуществляются с помощью механического привода.

6. Комплект поставки:

- кровать – 1 шт.;
- эксплуатационная документация – 1 шт.

7. Кровать в деталях



1 – Складные боковые ограждения
2 – Головная спинка
3 – Ножная спинка

4 – Спинная секция ложа
5 – Рукоятка регулировки спинной секции кровати
6 – Рукоятка регулировки функции переворота

8. Установка кровати


1. Освободите кровать от упаковки.
2. Проверьте кровать на предмет возможных повреждений, которые могли произойти во время транспортировки.
3. Внимательно прочитайте руководство пользователя.
4. С помощью болтов присоедините боковые ограждения к раме.
5. Проверьте, блокируются ли боковые ограждения в поднятом положении.
6. Проверьте полноту комплектации, если были заказаны опции.



Если во время установки обнаружены какие-либо неисправности или повреждения, не пользуйтесь кроватью и уведомьте о них производителя.


9. Положения кровати

9.1. Регулировка спинной секции

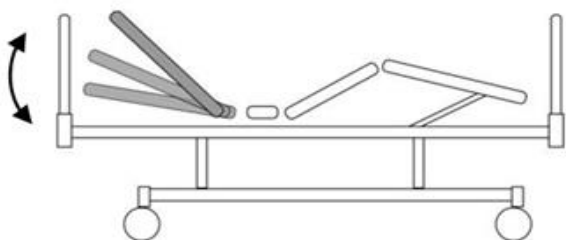

Спинная секция ложа может быть поднята до 87° при помощи рукоятки регулировки спинной секции кровати, которая находится под ножной спинкой.

9.2. Функция переворота

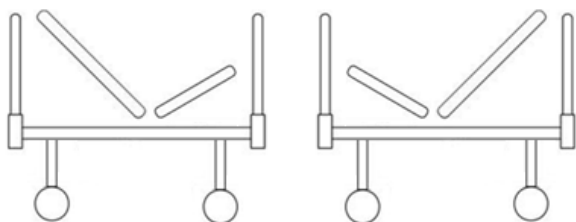

Функция переворота может быть использована при помощи рукоятки регулировки функции переворота, которая находится под боковым ограждением кровати. Макс. угол переворота - 52°.

10. Спинки кровати



Спинки кровати выполнены из ЛДСП и устанавливаются на быстросъемные механизмы, поэтому могут легко монтироваться и сниматься.

11. Боковые ограждения



В модели имеются опускаемые боковые ограждения, изготавливаемые из металла.

Чтобы опустить боковое ограждение, нажмите курок-фиксатор.

Чтобы привести боковое ограждение в вертикальное положение, потяните его вверх до щелчка.



Если пациент без сознания или не может встать, ограждения должны находиться в поднятом положении. Удостоверьтесь, что ограждения зафиксированы.

12. Очистка и дезинфекция



При очистке кровати используйте только безопасные для здоровья обеззараживающие средства.



Не используйте чистящие вещества, которые могут привести к коррозии элементов кровати.



Не используйте для очистки моющие средства, спирт, кислоты и ацетон, которые могут повредить пластиковые элементы кровати.

Перед очисткой, для облегчения доступа к нижней части ложа, кровать должна быть приведена в соответствующее положение.

13. Хранение

- Опустите боковые ограждения.
- Упакуйте кровать в подходящий упаковочный материал.

14. Техническое обслуживание

Поскольку некоторые части кровати могут изнашиваться в процессе использования, очистки и дезинфекции, проводите визуальный осмотр следующих элементов кровати не реже одного раза в 6 месяцев:

1. Соединения и штифты боковых ограждений.
2. Штифты регулируемых секций, а также все подвижные элементы кровати - протрите и смажьте силиконовой смазкой.
3. Правильность и плавность хода поворотов бокового ограждения.
4. Раз в 6 месяцев

Иные процедуры технического обслуживания - это квалифицированная работа, которую мы рекомендуем проводить при помощи профессионального сервиса.

Если вы обнаружили неисправности или несоответствия во время технического обслуживания, прекратите использование кровати и немедленно свяжитесь с производителем или поставщиком.

15. Гарантийные обязательства

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель _____

Срок гарантии: _____ 12 месяцев _____

Дата продажи: _____

м.п.

Продавец: _____