

## Сведения о сертификации

Наименование: Ходунки Dayang Medical XS303  
(вид 136520)

Р/у от 08.09.2016 № РЗН 2016/4717

Производитель: «Гуандун Даянг Медикал  
Технолоджи Ко., Лтд.», Китай

Guangdong Dayang Medical Technology Co.,  
Ltd., Xingxian Development Zone,  
Changhongling Industrial Park (2nd Phase),  
Dali, Nanhai District, 528234 Foshan, Guangdong,  
China

Импортер в России:

ООО «Реамед»

Адрес : 394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11

Тел: +7 (473) 300-31-91

По вопросам гарантийного обслуживания

Вы можете обратиться по телефону:

8-800-500-14-14

www.ortonica.ru

## Гарантийное обслуживание

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты продажи.

Срок хранения не ограничен.

Быстроизнашиваемые детали гарантийному об-  
служиванию не подлежат.

| Дата продажи | Подпись продавца/Поставщика |
|--------------|-----------------------------|
|              | М.П.                        |




## Ходунки шагающие XS 303



ortonica.ru

 vk.com/ortonica

 @ortonica

 8-800-500-14-14



## Инструкция по эксплуатации

8-800-500-14-14  
ortonica.ru



Для безопасной и приятной эксплуатации компания Ortonica рекомендует подробно ознакомиться с данным руководством пользователя.

## 1. Назначение

Шагающие ходунки Ortonica XS 303 предназначены для передвижения людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Ходунки изготовлены из алюминиевого сплава, имеют высококачественное покрытие, складываются и раскладываются без инструмента.

Ходунки оснащены функцией «шагание» - очередная перестановка левой и правой опорных сторон по ходу движения. Эта функция позволяет передвигаться достаточно быстро, не теряя равновесия.

## 2. Показания к применению

- Нарушение функции опорно-двигательного аппарата;
- Реабилитация после операций, травм и переломов конечностей;
- Болезни системы кровообращения, органов дыхания, органов пищеварения, мочеполовой системы;
- Умеренные и выраженные явления гемипареза.

## 3. Противопоказания



Перед эксплуатацией ходунков рекомендуем проконсультироваться с лечащим врачом.

- Выраженные или значительно выраженные нарушения статодинамических функций верхних конечностей;
- Психические расстройства;
- Потеря функциональности обеих рук;
- Нарушения статики и координации движения;
- Тяжелые нарушения вестибулярного аппарата.

## 4. Эксплуатация

1. Перед первой эксплуатацией рекомендуем воспользоваться сторонней помощью.
2. Разложите раму;
3. Внимательно осмотрите ходунки, убедитесь в целостности соединительных узлов;
4. Отрегулируйте высоту ножек. Для этого нужно сжать фиксатор, и переустановить опору на нужный уровень (рис. 1.). Когда фиксатор попадет в пазы, опора зафиксируется. Все опоры должны быть отрегулированы симметрично.



Убедитесь, что ножки надежно зафиксированы!



Рис. 1

5. Ходунки компактно складываются. Чтобы сложить конструкцию необходимо нажать на фиксатор на раме (рис. 2), затем свести по направлению друг к другу левую и правую опорные стороны ходунков (рис. 3).



Рис. 2



Рис. 3

## 5. Меры предосторожности

- Никогда не пытайтесь подняться по лестнице или эскалатору с ходунками;
- Не переносите весь вес тела на одну сторону рамы - ходунки могут опрокинуться;
- С осторожностью перемещайтесь по мокрым и скользким поверхностям;
- Не используйте ходунки, если не уверены в их исправности;
- Нельзя использовать ходунки при головокружении;
- Старайтесь поддерживать максимально ровное положение спины и всего тела – держать осанку;
- При ходьбе необходимо смотреть вперед, не акцентируя внимание на ходунках.

## 6. Хранение и уход

Рекомендуем хранить ходунки в сухом и чистом месте. Конструкция компактно складывается, поэтому не занимает много места. Очищать раму и другие части изделия с помощью мягкой ткани с использованием мыльных моющих средств. После очистки, изделие просушить.

## 7. Технические характеристики

| Параметры                      | XS 303      |
|--------------------------------|-------------|
| Габариты (Д/Ш/В), (± 1 см)     | 47/54/75-95 |
| Ширина между ручками, (± 1 см) | 44          |
| Грузоподъемность, кг           | 100         |
| Масса (нетто/брутто), кг       | 2,4         |
| Количество штук в упаковке     | 1           |

**Комплектация:** Ходунки 1 шт.;  
Руководство 1 шт.