

**medi**

# Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно  
[www.medi-salon.ru](http://www.medi-salon.ru)

medi. Почувствуйте себя лучше.



1



2



3

# medi CTS

## Назначение

medi CTS — это Шина для запястья и пальцев кисти. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения запястья сустава; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже в качестве раневого покрытия.

## Показания

- Консервативная терапия и постоперативное лечение карпального туннельного синдрома (CTS)
- Иммобилизация запястья и пальцев

## Противопоказания

До настоящего времени не выявлены

## Рекомендации по надеванию

- Ладонная часть шины изогнута с учетом анатомии кисти. При необходимости изгиб шины можно моделировать по руке пациента. По возможности убедитесь в отсутствии промежутка между изделием, предплечьем и кистью. Пальцы должны поддерживаться в физиологически выгодном положении (рис.1).
- Загните боковые части шины на предплечье, в области запястья и на кончиках пальцев (рис.2).
- Застегните ленты (рис. 3).

## Рекомендации по применению

Только постоянное использование medi CTS способствует эффективному лечению.

## Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните застёжки-липучки. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием мощного средства medi clean.
- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



## Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

## Материалы

Алюминий, полиамид

## Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством.

## Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

## Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!