

medi



Инструкция по применению
и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

medi. Почувствуйте себя лучше.



1



2



3



4

medi Wrist support

Назначение

Бандаж на лучезапястный сустав medi Wrist support может быть использован только в случае отсутствия заболеваний и повреждений кожи непосредственно в области применения бандажа в качестве раневого покрытия.

Показания

- хроническое или посттравматическое повреждение мягких тканей запястья
- паралич лучевого нерва
- травмы и повреждения лучезапястного сустава
- тендиниты и теносиновиты
- ревматоидный артрит

Противопоказания

До настоящего времени не выявлены.

Принцип действия

Иммобилизация и стабилизация запястья при помощи моделируемой алюминиевой шины.

Рекомендации по надеванию

- Вставьте предварительно смоделированную алюминиевую шину в карман.
- Расстегните ремни и вставьте руку в ортез. Алюминиевая шина должна располагаться с ладонной стороны конечности.
- Застегните ремень, ближайший к пальцам.
- Застегните ремень, ближайший к локтевому сгибу.
- Застегните средний ремень.

Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните застёжки-липучки. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства medi clean или в щадящем режиме стирки при температуре 30 °C с мягким моющим средством без использования ополаскивателя.
- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Материалы

лайкра, Алюминий

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!