



Инструкция по эксплуатации

TU 233-4

Назначение

Насадка на унитаз Ortonica TU 233-4 предназначена для использования в туалетных комнатах.

Ответственность

Изготовитель несет ответственность только при использовании изделия в заданных условиях и в соответствии с предусмотренным назначением. Изготовитель рекомендует использовать изделие надлежащим образом и осуществлять уход в соответствии с данной инструкцией. Изготовитель не несет ответственности за повреждение вследствие использования неразрешенных элементов и запасных частей.



Обновление последней редакции инструкции по эксплуатации Вы найдете на нашем сайте ortonica.ru

Указания по технике безопасности

Рекомендуем перед началом использования насадки промыть ее теплой водой с мыльным раствором.

Запрещается эксплуатировать изделие с незакрепленными деталями.

Распаковка и сборка

Насадка на унитаз упакована в картонную коробку, которую мы рекомендуем сохранить. Изделие не требует сборки, так как поставляется в собранном виде.

Эксплуатация насадки на унитаз

Пересаживание

Помните, что, совершая пересаживание, во всех случаях лучше воспользоваться сторонней помощью, чтобы предупредить возможность получения травм. Для комфортного пересаживания откиньте вверх подлокотник.

Установка

Туго затяните фиксатор (Рис. 1).



Рис. 1

Гарантийный талон

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия
3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Дата продажи	Подпись продавца / Поставщика

Единый сервисный центр: 8 800 707 44 52

Насадка на унитаз Ortonica TU 233-4


Гарантийный срок эксплуатации: 1 год

Производитель: «Джензианг Ашуре Медикал Экуипмент Ко. Лтд.», Китай, ZhenJiang Assure Medical Equipment Co. Ltd. NO.3. factory, Xingdingmao Industry Park, Dingmao Development Zone, Zhenjiang city, Jiangsu Province, China.

Импортер в России: ООО «Реамед»

Адрес: 394026 г. Воронеж, Московский пр-т, 11

Тел: 8 800 500 14 14

 8-800-500-14-14

 ortonica.ru

 vk.com/ortonica

 @ortonica