

medi



Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

Инструкция по использованию

medi arm sling («МЕДИ АРМ СЛИНГ»)

Бандаж для верхней конечности поддерживающий

Регистрационное удостоверение № ФЗС 2011/09661 от 21 апреля 2011 года, срок действия не ограничен.

Уважаемый покупатель,

спасибо, что Вы выбрали бандаж medi arm sling. Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию и убедитесь, что Вы умеете правильно надевать изделие и знаете правила его эксплуатации.

Показания

Послеоперационный период.
Иммобилизация плеча.


Принцип действия

Разгрузка верхней конечности

Противопоказания

До настоящего времени не выявлены.

Инструкция по надеванию

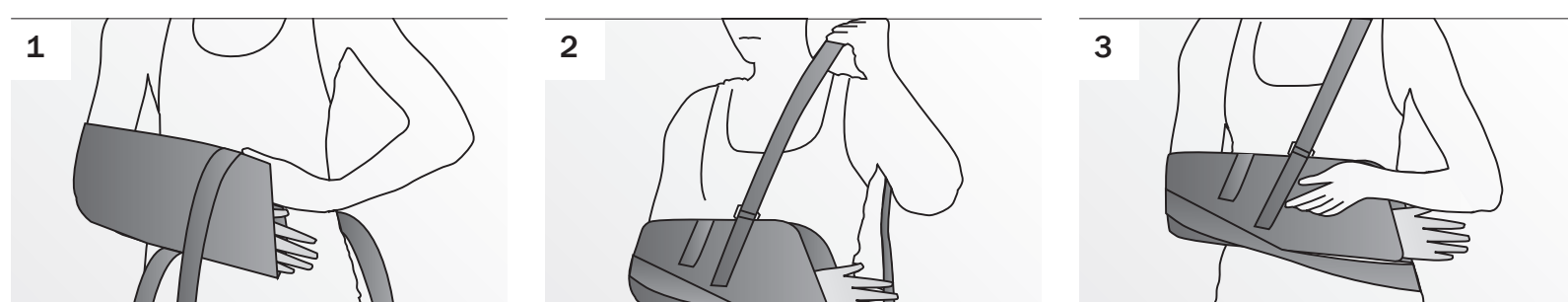

- Расстегните застежки-липучки и положите руку в поддерживающую часть бандажа.
- Протяните плечевой ремень за спиной, перекиньте через здоровое плечо и зафиксируйте застежкой-липучкой на поддерживающей части бандажа.
- Оберните поясной ремень вокруг тела и зафиксируйте застежкой на поддерживающей части бандажа. Поддерживающая часть бандажа индивидуально моделируется под необходимую длину предплечья при помощи застежки-липучки.

Важная информация

Данное изделие предназначено только для индивидуального применения. В случае использования изделия более чем одним пациентом гарантии производителя утрачивают силу. Если при использовании изделия возникли боли или неприятные ощущения, пожалуйста, незамедлительно обратитесь к Вашему лечащему врачу. Не используйте изделие при наличии незакрытых асептическими повязками ран. Применяйте изделие только согласно рекомендациям лечащего врача.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев с момента продажи при условии использования изделия по назначению.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате: а) каких-либо происшествий, неправильного использования, экстремальных условий эксплуатации или неправильного хранения; б) воздействия чрезмерных усилий; в) непредусмотренного производителем использования или внесения изменений в конструкцию.

Срок годности изделия

Срок годности не ограничен.

Инструкция по уходу

Стирайте изделие вручную в прохладной воде (30 °С) с использованием обычного мыла. Тщательно прополощите: остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать ускоренному износу материала. Не отжимайте. Сушите изделие на воздухе. Не гладьте. Изделие можно использовать как в пресной, так и в соленой воде. После использования в воде тщательно прополощите изделие и высушите его на воздухе. Не выводите пятна с помощью бензола и других химикатов-детергентов.



Состав

Тканевая основа:

полиэстер 82%, эластан 18%

Наполнитель:

полиамид, пенополиэтилен, полиэстер

Ремни и крепления:

полиэстер, полиамид, нейлон

Цвет

Голубой (blue)

Инструкция по хранению

Храните изделие в сухом прохладном месте вдали от прямого солнечного света.

Инструкция по утилизации

Изделие утилизируют вместе с бытовыми отходами.

Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!

Все претензии и пожелания принимает ООО «МЕДИ РУС» - импортер и уполномоченный представитель производителя в России по адресу:
121609, Москва, ул. Осенняя, 4, корп. 1