

medi



Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

medi. Почувствуйте себя лучше.

circaid® juxtafit® premium foot pieces

Предназначение

circaid juxtafit premium interlocking ankle foot wrap и circaid juxtafit premium ankle foot wrap - неэластичные компрессионные бинды многоцветного индивидуального использования, предназначенные для лечения пациентов с венозными нарушениями, а также лимфатическими расстройствами. Компрессионные бинды представляют собой серию лент, исходящих из центральной части изделий и последовательно накладываемых друг на друга в области от основания пальцев стопы до уровня чуть выше лодыжки.

Показания

- Лимфедема
- Другие формы отеков:
 - венозные
 - посттравматические
 - послеоперационные
- Лимфедема
- Варикозная болезнь (всех типов)
- Хроническая венозная недостаточность (ХВН)
- Венозный стаз
- Несостоятельность венозных клапанов
- Посттромботический синдром
- Трофические венозные язвы
- Состояния после склеротерапии
- Венозная экзема
- Липодерматосклероз

Относительные противопоказания

В соответствии с существующими противопоказаниями, лечащий врач оценивает состояние пациента и соотносит потенциальную пользу от применения данного компрессионного изделия (например, при хронической венозной недостаточности) с возможными рисками терапевтического применения данного медицинского изделия пациентом.

- Нарушение или отсутствие чувствительности нижних конечностей
- Аллергические реакции на компоненты компрессионного изделия

Абсолютные противопоказания

Состояния, при которых использование компрессионных изделий абсолютно исключено, несмотря на наличие показаний (например, хроническая венозная недостаточность)

- Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей средней и тяжелой степени
- Декомпенсированная сердечная недостаточность
- Септический флебит
- Синий болевой флебит
- Инфекция области голеностопного сустава и/или стопы.

Хранение



Хранить в сухом месте



Беречь от солнечного света



Гарантийный срок реализации в виде символа песочных часов и обозначения даты «месяц-год» указан на наклейке изготовителя, расположенной на упаковке изделия. Изготовленные по индивидуальному заказу изделия являются товаром для немедленного использования и гарантийный срок реализации на них не указывается.

Срок эксплуатации

Срок эксплуатации изделий circaid juxtafit premium interlocking ankle foot wrap и circaid juxtafit premium ankle foot wrap при ежедневном использовании составляет не более 3 месяцев.

Ввиду износа материала медицинская эффективность изделия может быть гарантирована только на указанные сроки эксплуатации при условии соблюдения рекомендаций, изложенных в настоящей инструкции по использованию.

Утилизация



Утилизировать с бытовыми отходами. К медицинским компрессионным изделиям не

применяются специальные требования по утилизации.

Маркировка CE

Маркировка CE ставится на все серийные изделия и подтверждает соответствие Директиве ЕС 93/42/ЕЕС.

На основании Директивы ЕС 93/42/ЕЕС маркировка CE не ставится на изделия, изготовленные по индивидуальному меркам по требованию заказчика. Такие изделия соответствуют основным требованиям Приложения I Директивы.

Состав материала

circaid juxtafit premium interlocking ankle foot wrap / circaid juxtafit premium ankle foot wrap
51% Полиуретан
44% Нейлон
3% Эластан
2% Полиэтилен









Данное изделие не содержит латекс.

Рекомендации по стирке

Изделие можно стирать в машине, используя деликатный режим и сушить при невысокой температуре. При этом во избежание налипания ворса на застежки-липучки и повреждения другой одежды рекомендуется помещать изделие в защитную сетку.

Чтобы продлить срок службы изделия, его следует стирать вручную и сушить, не отжимая.

-
-  Машинная стирка в теплой воде
 -  Не отбеливать
 -  Сушить в сушильной машине при невысокой температуре
 -  Не гладить
 -  Не применять химчистку
 -  Не отжимать
-

Указания по эксплуатации

Слегка ослабляйте ленты изделия в ночное время. Если Вы испытываете дискомфорт в положении лежа, рекомендуется снять изделие *circaid ankle foot wrap*.

Если Вы чувствуете боль, немедленно снимите изделие. При правильном расположении, ленты должны слегка перекрывать друг друга, между лентами не должно быть пустого пространства.

Не подворачивайте ленты. Застежка-липучка ни в коем случае не должна соприкасаться с кожей!

Инструкции по индивидуальному использованию

Изделие *circaid juxtafit premium interlocking ankle foot wrap* не может быть разрезано или любым способом модифицировано. В противном случае гарантия в 3 месяца теряет силу.

Изделие *circaid juxtafit premium ankle foot wrap* может быть изменено в соответствии с формой и длиной ноги пациента. Изделие *circaid juxtafit ankle foot wrap* должно быть сформировано

медицинским работником. В противном случае гарантия в три месяца теряет силу.

При разрезании изделия необходимо соблюдать осторожность, чтобы не разрезать часть застежки-липучки с усиленным швом.

- 1* Задник
- 2* Отметка
- 3* Линия разреза
- 4* Усиленный шов
- 5* Лента для лодыжки

Более подробная информация приведена в разделе „Корректировка“

Надевание *circaid® juxtafit® premium interlocking ankle foot wrap*

Шаг 1.

Сначала наденьте носок *circaid*. Шов на носке должен быть снаружи. Убедитесь, что на носке не образовалось складок.

Шаг 2.

Просуньте ногу в изделие *circaid juxtafit interlocking ankle foot wrap*. Разверните две ленты, которые находятся ближе всего к пальцам, и прикрепите их к противоположной стороне изделия, создавая сильную, но комфортную компрессию. В то время, когда Вы будете прикреплять вторую ленту, потяните ленту для лодыжки в противоположном направлении.

Шаг 3.

Убедитесь, что стопа правильно размещена внутри изделия; передний край компрессионного изделия должен совпадать с

основанием пальцев ноги. Отрегулируйте перекрывающиеся пяточные ленты, чтобы они плотно прилегали к задней части пятки и прикрепите к полоскам для фиксации, создавая сильную, но комфортную компрессию.

Шаг 4. Открепите ленту для лодыжки, оберните ее вокруг лодыжки, обеспечивая сильную и комфортную компрессию, прикрепите ее к полоске для фиксации. Убедитесь в отсутствии пустых пространств. Откорректируйте ленту для лодыжки, если присутствуют пустоты или точки избыточного давления. Лента для лодыжки должна перекрывать компрессионное изделие **circaid** для голени.

Указание.

Лента для лодыжки должна вытягиваться с противоположной стороны, в зависимости от того, на какую ногу (правую или левую) надевается компрессионное изделие.

Шаг 5. Поправляйте ленты по мере необходимости в течение дня, чтобы обеспечить устойчивую и комфортную компрессию.

Снимание **circaid[®] **juxtafit**[®] **premium interlocking ankle foot wrap****

Сначала открепите ленту для лодыжки и сверните ее внутрь, оберегая от ворсинок. Затем, ослабьте две ленты возле пальцев и сверните их внутрь. Не открепляйте пяточные ленты для более легкого повторного надевания.

Надевание **circaid[®] **juxtafit**[®] **premium ankle foot wrap****

Шаг 1.

Сначала наденьте носок **circaid**. Шов на носке должен быть снаружи. Убедитесь, что на носке не образовалось складок.

Шаг 2.

Разверните две ленты, которые находятся ближе всего к пальцам, и прикрепите их к противоположной стороне изделия, создавая форму тапочки. Вставьте ногу в верхнее отверстие, как при надевании тапочки, и плотно прижмите пятку к заднику.

Шаг 3.

Передний край изделия в области стопы должен быть выровнен по основанию пальцев ноги.

Шаг 4.

Натяните ленту, находящуюся ближе всего к пальцам, и обеспечьте сильную, но комфортную компрессию. Удерживая ленту для лодыжки в противоположном направлении, закрепите вторую ленту, создавая сильную, но комфортную компрессию. Если необходимо, откорректируйте ленту, находящуюся ближе всего к пальцам, добиваясь сильной, но комфортной компрессии. Откорректируйте ленту для лодыжки, если наблюдаются пустоты или точки избыточного давления. Лента для лодыжки должна перекрывать компрессионное изделие **circaid** для голени.

Указание.

Лента для лодыжки должна вытягиваться с противоположной стороны, в

зависимости от того, на какую ногу (правую или левую) надевается бандаж.

Шаг 6.

Регулируйте ленты по мере необходимости в течение дня, чтобы поддерживать сильную, но комфортную компрессию.

Изделие никогда не должно причинять боль. Давление должно быть сильным, но комфортным.

Снятие circaid® juxtafit® premium ankle foot wrap

Сначала открепите ленту для лодыжки и вторую ленту, скатайте их внутрь, чтобы избежать налипания ворсинок на застежки-липучки. Затем ослабьте переднюю первую ленту изделия и circaid premium ankle foot wrap снимется как тапочка.

Корректировка изделия circaid® juxtafit® premium ankle foot wrap

Посредством описанных ниже действий можно уменьшить длину стопы в компрессионном изделии circaid juxtafit premium ankle foot wrap максимально на 1,25 дюйма (3 см).

Шаг 1.

Отметьте желаемую длину на бежевой поверхности изделия.

Шаг 2.

Нарисуйте прямую линию в месте, где Вы хотите разрезать.

Шаг 3.

Аккуратно выполните разрез по нарисованной линии так, чтобы не разрезать часть застежки-липучки с усиленным швом.

Примечание.

При использовании изготовленного на заказ multiple circaid juxtafit, очень легко затягивайте нижние ленты для достижения необходимого градиента давления. Установите оставшиеся ленты на комфортном давлении достаточной силы или предписанном уровне давления.
