

Сведения о сертификации

Наименование: Ходунки Dayang Medical XS308
(вид 136520)

Р/у от 08.09.2016 № РЗН 2016/4717

Производитель: «Гуандун Даянг Медикал
Технолоджи Ко., Лтд.», Китай

Guangdong Dayang Medical Technology Co., Ltd.,
Xingxian Development Zone, Changhongling
Industrial Park (2nd Phase), Dali, Nanhai District,
528234 Foshan, Guangdong, China

Импортер в России:

ООО «Реамед»

Адрес : 394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11

Тел: +7 (473) 300-31-91

По вопросам гарантийного обслуживания

Вы можете обратиться по телефону:

8-800-500-14-14

www.ortonica.ru

Гарантийное обслуживание

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты продажи.

Срок хранения не ограничен.

Быстроизнашиваемые детали гарантийному об-
служиванию не подлежат.

Дата продажи	Подпись продавца/Поставщика
	М.П.



Ходунки шагающие XS 308



ortonica.ru



8-800-500-14-14



vk.com/ortonica



@ortonica



Инструкция по эксплуатации

8-800-500-14-14
ortonica.ru



Для безопасной и приятной эксплуатации компания Ortonica рекомендует ознакомиться с инструкцией по эксплуатации

1. Назначение

Двухуровневые шагающие ходунки Ortonica XS 308 предназначены для передвижения людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Ходунки изготовлены из алюминиевого сплава, имеют высококачественное, антикоррозийное покрытие, складываются и раскладываются без инструмента.

Ходунки оснащены функцией «шагание» - поочередная перестановка левой и правой опорных сторон по ходу движения. Эта функция позволяет передвигаться достаточно быстро, не теряя равновесия. Два ряда поручней облегчают вставание и пересаживание.

2. Показания к применению

- Нарушение функции опорно-двигательного аппарата;
- Реабилитация после операций, травм и переломов конечностей;
- Болезни системы кровообращения, органов дыхания, органов пищеварения, мочеполовой системы;
- Умеренные и выраженные явления гемипареза.

3. Противопоказания



Перед эксплуатацией ходунков рекомендуем проконсультироваться с лечащим врачом.

- Выраженные или значительно выраженные нарушения статодинамических функций верхних конечностей;
- Психические расстройства;
- Потеря функциональности обеих рук;
- Нарушения статики и координации движения;
- Тяжелые нарушения вестибулярного аппарата.

4. Эксплуатация

1. Перед первой эксплуатацией рекомендуем воспользоваться сторонней помощью.
2. Разложите раму;
3. Внимательно осмотрите ходунки, убедитесь в целостности соединительных узлов;
4. Отрегулируйте высоту ножек. Для этого необходимо сжать фиксатор и переустановить опору на нужный уровень (рис. 1.). Когда фиксатор попадет в пазы, опора зафиксируется. Все опоры должны быть отрегулированы симметрично.



Убедитесь, что ножки надежно зафиксированы!



Рис. 1

5. Ходунки компактно складываются. Чтобы сложить конструкцию необходимо нажать на фиксатор на раме (рис. 2), затем свести по направлению друг к другу левую и правую опорные стороны ходунков (рис. 3).



Рис. 2



Рис. 3

5. Меры предосторожности

- Никогда не пытайтесь подняться по лестнице или эскалатору с ходунками;
- Не переносите весь вес тела на одну сторону рамы - ходунки могут опрокинуться;
- С осторожностью перемещайтесь по мокрым и скользким поверхностям;
- Не используйте ходунки, если не уверены в их исправности;
- Нельзя использовать ходунки при головокружении;
- Старайтесь поддерживать максимально ровное положение спины и всего тела – держать осанку;
- При ходьбе необходимо смотреть вперед, не акцентируя внимание на ходунках.

6. Хранение и уход

Рекомендуем хранить ходунки в сухом и чистом месте. Конструкция компактно складывается, поэтому не занимает много места. Очищать раму и другие части изделия с помощью мягкой ткани с использованием мыльных моющих средств. После очистки, изделие просушить.

7. Технические характеристики

Параметры	XS 308
Габариты (Д/Ш/В), (± 1 см)	47/54/79-97
Ширина между ручками, (± 1 см)	44
Грузоподъемность, кг	100
Масса (нетто/брутто), кг	2,6
Количество штук в упаковке	1

Комплектация: Ходунки 1 шт.;
Руководство 1 шт.