

medi



Инструкция по применению
и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

medi. Почувствуйте себя лучше.

circaid® undersleeve & undersocks

Внутренний лайнер circaid undersleeve leg - трубчатое трикотажное изделие для нижней конечности, предназначенное для использования под компрессионные биндажи circaid. Внутренний лайнер повышает комфорт и переносимость компрессионных биндажей.

Внутренний лайнер circaid socks - трикотажное изделие, предназначенное для использования под компрессионные изделия circaid, для повышения комфорта и переносимости.

Утилизация



Утилизировать с бытовыми отходами. К изделиям не применяются специальные требования по утилизации.

Состав материала

circaid undersleeve lower leg
внутренний лайнер на область голени

circaid undersleeve whole leg
внутренний лайнер на область нижней конечности

94% Хлопок
6% Эластан

circaid undersleeve/
undersocks lower leg silver
внутренний лайнер/
внутренний лайнер (носок) на
область голени с серебром
circaid undersleeve/
undersocks whole leg silver
внутренний лайнер/
внутренний лайнер (носок) на
область нижней конечности с
серебром
91% Полиэстер
5% Нейлон с покрытием,
содержащим серебро
4% Эластан

circaid undersocks lower leg
внутренний лайнер (носок) на
область голени
circaid undersocks whole leg
внутренний лайнер (носок) на
область нижней конечности
94% Хлопок
6% Эластан






circaid undersocks lower leg
cotton terry внутренний лайнер
(носок) на область голени с
содержанием махровой ткани
circaid undersocks whole leg
cotton terry внутренний лайнер
(носок) на область нижней
конечности с содержанием
махровой ткани
94% Хлопок
6% Эластан

circaid undersocks lower leg
extra wide внутренний лайнер
(носок) на область голени
широкий
circaid undersocks whole leg
extra wide внутренний лайнер
(носок) на область нижней
конечности широкий
94% Хлопок
6% Эластан



Изделие не содержит латекс.

Рекомендации по стирке

-  Машинная стирка, в теплой воде
 -  Не отбеливать
 -  Сушить в сушильной машине при невысокой температуре
 -  Не гладить
 -  Не применять химчистку
-

Примечания

Данное изделие не обеспечивает терапевтическую компрессию.

Существуют следующие ограничения по объему конечности при использовании изделий:

circaid undersleeve lower leg подходит для конечностей с окружностью до 25 дюймов / 64 см.

circaid undersleeve whole leg подходит для конечностей с окружностью до 25 дюймов / 64 см.

circaid undersleeve lower leg silver подходит для конечностей с окружностью до 28 дюймов / 71 см.

circaid undersleeve whole leg silver подходит для конечностей с окружностью до 28 дюймов / 71 см.

circaid undersocks lower leg подходит для конечностей с окружностью до 31 дюймов / 79 см.

circaid undersocks whole leg подходит для конечностей с окружностью до 31 дюймов / 79 см.

circaid undersocks lower leg silver подходит для конечностей с окружностью до 28 дюймов / 71 см.

circaid under socks whole leg silver подходит для конечностей с окружностью до 28 дюймов / 71 см.

circaid undersocks lower leg cotton terry подходит для конечностей с окружностью до 36 дюймов / 91 см.

circaid undersocks whole leg cotton terry подходит для конечностей с окружностью до 36 дюймов / 91 см.

circaid undersocks lower leg и circaid socks whole leg extra wide подходят для конечностей с окружностью до 59 дюймов / 150 см.

circaid reduction kit undersleeves подходит для конечностей с окружностью до 49 дюймов / 125 см.
