

medi



Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать
онлайн удобно
www.medi-salon.ru

Инструкция по использованию

protect.Collar soft («ПРОТЕКТ.КОЛЛАР СОФТ»)

Шейный воротник.

Регистрационное удостоверение № ФЗС 2011/09663

от 21 апреля 2011, срок действия не ограничен.

Уважаемый покупатель,

спасибо, что Вы выбрали воротник protect.Collar soft. Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию и убедитесь, что Вы умеете правильно надевать изделие и знаете правила его эксплуатации.

Показания

Цервикальный синдром.

Гипермобильность шейного отдела позвоночника.

Ревматизм шейного отдела позвоночника.

Растяжение мышц шеи.

Хлыстовая травма.

Дегенеративные изменения в шейном отделе позвоночника.

Принцип действия

Поддержка шейного отдела позвоночника

Противопоказания

До настоящего времени не выявлены.

Инструкция по надеванию

Оберните воротник вокруг шеи: анатомический вырез должен быть под подбородком, а ровная часть должна располагаться на мягких тканях шеи.

Важная информация

Данное изделие предназначено только для индивидуального применения. В случае использования изделия более чем одним пациентом гарантии производителя утрачивают силу. Если при использовании изделия возникли боли или неприятные ощущения, пожалуйста, незамедлительно обратитесь к Вашему лечащему врачу. Не используйте изделие при наличии незакрытых асептическими повязками ран. Применяйте изделие только согласно рекомендациям лечащего врача.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев с момента продажи при условии использования изделия по назначению.


Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате: а) каких-либо происшествий, неправильного использования, экстремальных условий эксплуатации или неправильного хранения; б) воздействия чрезмерных усилий; в) непредусмотренного производителем использования или внесения изменений в конструкцию.

Срок годности изделия

Срок годности не ограничен.

Инструкция по уходу

Стирайте изделие вручную в прохладной воде (30 °С) с использованием обычного мыла. Тщательно прополощите: остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать ускоренному износу материала. Не отжимайте. Сушите изделие на воздухе. Не гладьте. Изделие можно использовать как в пресной, так и в соленой воде. После использования в воде тщательно прополощите изделие и высушите на воздухе. Не выводите пятна с помощью бензола и других химикатов-детергентов.

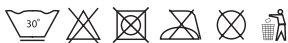

Состав

Тканевая основа:

полиэстер 82%, эластан 18%

Наполнитель: полиуретан

Ремни и крепления:

полиэстер, полиамид

Цвет

Голубой (blue)

Инструкция по хранению

Храните изделие в сухом прохладном месте вдали от прямого солнечного света.

Инструкция по утилизации

Изделие утилизируют вместе с бытовыми отходами.

Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!

Все претензии и пожелания принимает ООО «МЕДИ РУС» - импортер и уполномоченный представитель производителя в России по адресу: 121609, Москва, ул. Осенняя, 4, корп. 1