



Инструкция по эксплуатации

**LUX 450**

Благодарим Вас за выбор сиденья для ванны Ortonica. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации до того, как начнется им пользоваться.

Компания Ortonica желает Вам приятной и безопасной эксплуатации.

# Содержание

<b>1.</b>	<b>Общая информация</b>	
1.1	Назначение.....	2
1.2	Ответственность.....	2
1.3	Примечания.....	2
1.4	Указания по технике безопасности.....	3
<b>2.</b>	<b>Распаковка и сборка</b>	
2.1	Комплектация.....	4
2.2	Распаковка и сборка.....	4
<b>3.</b>	<b>Эксплуатация сиденья для ванной</b>	
3.1	Пересаживание.....	5
3.2	Установка .....	5
3.3	Регулировки.....	5
3.4	Поворотный механизм.....	6
<b>4.</b>	<b>Техническое обслуживание и уход</b>	
<b>5.</b>	<b>Гарантийное обслуживание</b>	

# 1. Общая информация

## 1.1 Назначение

Сиденье для ванны Ortonica Lux 450 предназначено для проведения санитарно-гигиенических процедур в ванных комнатах.

## 1.2 Ответственность

Изготовитель несет ответственность только при использовании изделия в заданных условиях и в соответствии с предусмотренным назначением. Изготовитель рекомендует использовать изделие надлежащим образом и осуществлять уход в соответствии с данной инструкцией. Изготовитель не несет ответственности за повреждение вследствие использования неразрешенных элементов и запасных частей.

## 1.3 Примечания

Обновление последней редакции инструкции по эксплуатации Вы найдете на нашем сайте [store.ortonica.ru](http://store.ortonica.ru)

### Значение символов



Обратите внимание



Шестигранный ключ  
№ 4; 6; 9



Важная информация



Воспользуйтесь  
плоской отверткой



Воспользуйтесь  
крестовой отверткой



Воспользуйтесь  
накидным ключом

## 1.4 Указания по технике безопасности



Рекомендуем перед началом использования сиденья для ванной прочитать инструкцию по эксплуатации. Для безопасной первичной эксплуатации рекомендуем прибегнуть к помощи сторонних лиц.



Запрещается эксплуатировать изделие с незакрепленными деталями.



Не устанавливайте сиденье на наклонной поверхности



Перед эксплуатацией протрите изделие теплой водой с мощными средствами.

## 2. Распаковка и сборка

### 2.1 Комплектация

В комплект входят:

- картонная коробка 1 шт.;
- сиденье для ванной 1 шт.;
- инструкция по эксплуатации 1 шт.;
- подлокотники 2 шт.
- винты для фиксации подлокотников 4 шт.;
- пластиковые фиксаторы спинки 2 шт.

### 2.2 Распаковка и сборка



Сиденье для ванной упаковано в картонную коробку, которую мы рекомендуем сохранить. Изделие не требует сборки, так как поставляется в собранном виде.

# 3. Эксплуатация сиденья для ванной

## 3.1 Пересаживание


Помните, что, совершая пересаживание, во всех случаях лучше воспользоваться сторонней помощью, чтобы предупредить возможность получения травм.

## 3.2 Установка


Установите сиденье на ванную. При необходимости отрегулируйте ширину рамы для соответствия вашей ванной.

## 3.3 Регулировки

Сиденье для ванны Lux 300 настраивается по ширине ванной. Чтобы изменить ширину рамы, необходимо снять фиксатор и вытащить опору на необходимый уровень.

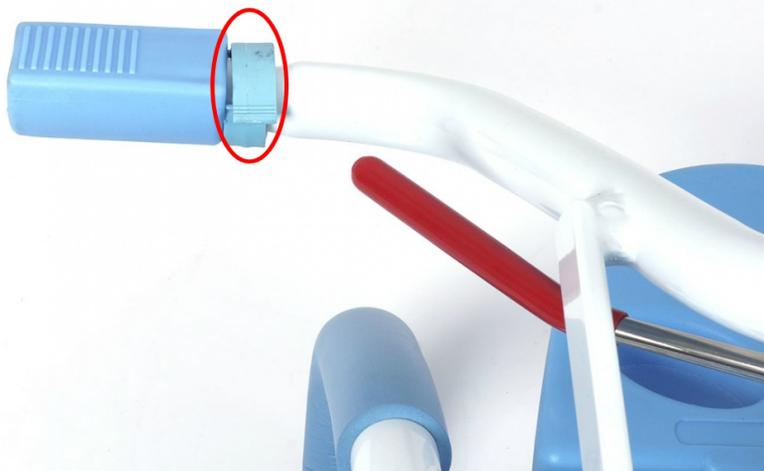

После регулировки установите фиксатор в исходное положение.

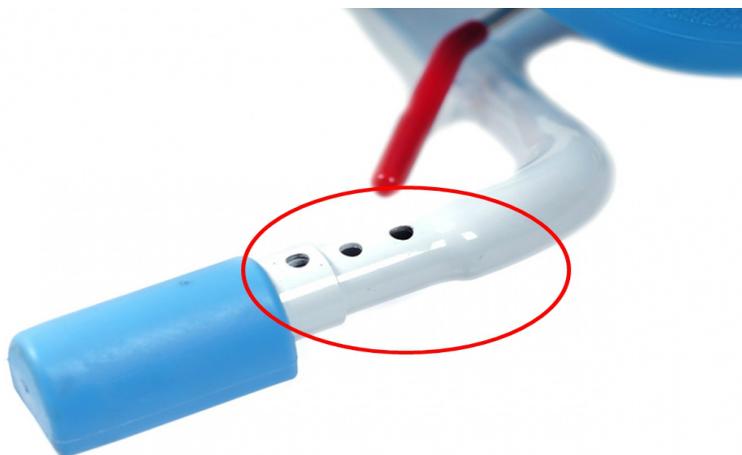

### 3.4 Поворотный механизм

Сиденье для ванны Lux 300 оснащено поворотным механизмом с возможностью фиксации через 90 градусов. Для того чтобы повернуть сиденье, необходимо поднять рычаг, установить необходимое положение, затем опустить рычаг.



## 4. Техническое обслуживание и уход

При эксплуатации сиденья для ванны необходим определенный технический уход.

Периодически проверяйте затяжку резьбовых соединений. Любые резьбовые соединения не должны крутиться от руки без сопротивления.

Рама выполнена из алюминиевого сплава, имеет полимерное покрытие, не подверженное коррозии при контакте с водой, что облегчает санитарную обработку стула.

При очищении допустимо использование воды и мягких моющих средств. Запрещается применение абразивных моющих средств и растворителей (ацетон, спирт и т.д.). После санитарной обработки рекомендуется насухо вытереть стул.

Следует предохранять сиденье от ударов твердыми и острыми предметами.

Не подвергайте сиденье для ванны длительному воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур.

При повреждении наконечников на ножках сиденья необходимо проести их замену.

## 5. Гарантийное обслуживание

Гарантийный срок эксплуатации: 1 год

**Производитель:** "Фошан Донгфэнг Медикал Эквипмент Мануфактори, (Лтд.)" Китай, Foschan Dongfang Medical Equipment Manufactory, Ltd, 5 Xingfu Rd., Zone A, Shishan Industrial Park, Nanhai District, Foshan city, China.

**Импортер в России:** ООО "Медрус"

Адрес : 394026. г. Воронеж, Московский пр-т,  
11 Тел: +7 (473) 300-31-91

По вопросам гарантийного обслуживания Вы можете обратиться по телефону: 8 800 500 14 14



8-800-500-14-14  
ortonica.ru